

ADVERTENCIAS:

No apto para niños ni para personas con dentadura postiza.

Diseñado para uso diurno; no duerma con la dentadura postiza en la boca.

Siga visitando a su dentista un mínimo de dos veces al año, como recomienda la ADA.

Easy Denture puede no adaptarse a todo el mundo debido a las diferencias en la estructura ósea y tisular de cada persona.

Llevar dentaduras postizas mal ajustadas puede causar efectos adversos,

incluidos, entre otros, la reabsorción ósea y puntos dolorosos. No utilice la dentadura si no consigue un buen ajuste.

Descripción del Dispositivo:

Easy Denture, pendiente de patente, está fabricada con una combinación de materiales que permite que se sienta y funcione como una dentadura hecha por un laboratorio, pero que se ajusta rápida y cómodamente como una boquilla de “hervir y morder”.

Indicaciones de Uso:

La dentadura postiza Easy Denture está diseñada para proporcionar a una persona desdentada una solución para masticar alimentos, hablar y sonreír. Es necesario que falten todos los dientes o que estén rotos en la línea de la encía

para utilizar Easy Denture.

Para una mejor colocación, lea y siga las instrucciones antes de comenzar la colocación de la prótesis Easy Denture y vuelva a leer cada paso a medida que avance.

El cuidado y la limpieza adecuados de Easy Denture son esenciales para mantener la dentadura. Utilice los artículos incluidos en este paquete de inicio, se pueden comprar artículos adicionales por separado. Se recomienda el uso diario de adhesivo aprobado por Easy Denture para mejorar la colocación de Easy Denture.

Disponga de elementos antes de empezar:



- Una cacerola, un hervidor de agua eléctrico o un recipiente grande apto para microondas con aproximadamente 4 pulgadas de agua.
- Un recipiente grande con agua fría
- Un reloj para medir (en segundos) cada paso del proceso
- Una espumadera, tenedor o pinzas para sacar la dentadura del agua hirviendo
- Un plato limpio para colocar la dentadura postiza para que se enfríe antes de colocarla.
- Un espejo para mirarse durante el proceso de colocación
- Bloque pulidor
- Easy Denture™

Limpieza, Mantenimiento y Almacenamiento:

- Utilice el adhesivo para prótesis Easy Denture para mejorar la colocación.
- Utilice diariamente las pastillas limpiadoras Easy Denture para limpiar suavemente su dentadura postiza. También se recomienda un limpiador ultrasónico UV.
- No deje Easy Denture en remojo en agua durante periodos prolongados.
- Almancene Easy Denture™ en el Estuche para Dentaduras Postizas cuando no lo utilice.
- No almacene Easy Denture™ a temperaturas superiores a 110° F.
- No deje la dentadura postiza expuesta a la luz solar durante periodos prolongados .
- Consulte la sección de Preguntas Frecuentes del sitio web de Easy Denture: [www.easydenture.com/faqs](http://www.easydenture.com/faqs)

1. Dentadura Superior

PASO 1

Lávese las manos durante 30 segundos con jabón. Saque la dentadura del embalaje.

ESTUFA: Añada 4 pulgadas de agua a una olla. Lleve el agua a ebullición.

OLLA ELÉCTRICA: Añada agua hasta la línea de llenado designada. Lleve el agua a ebullición.

MICROONDAS: Llene un recipiente apto para microondas con 4 pulgadas de agua y caliéntelo a máxima potencia durante 5 minutos o hasta que vea burbujas en el agua. No introduzca la dentadura en el agua mientras esté en el microondas.

Retirar el agua hirviendo del fuego.




PASO 2

Con una espumadera, introduzca la dentadura superior con los dientes hacia abajo en el agua caliente durante 60 segundos.

1 min (60 segundos= 1 minuto)

Evite las salpicaduras, el agua aun está muy caliente y puede causar quemaduras si entra en contacto con la piel.


No deje la dentadura en agua caliente durante más de 60 segundos

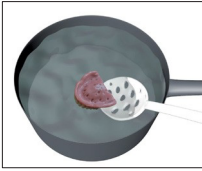

PASO 3

Retire la dentadura superior del agua y colóquela sobre la placa con los dientes hacia abajo para que se enfríe durante 60 segundos.

1 min (60 segundos= 1 minuto)

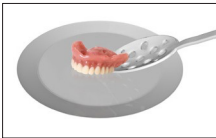

Durante el proceso de autoajuste, no deje Easy Denture en la boca durante mas de 180 segundos, ya que no desea que la dentadura se endurezca completamente mientras esta en la boca.

(180 segundos= 3 minutos)

Por ejemplo, inmediatamente a partir del momento en que saque Easy Denture del agua hirviendo, dispondrá de un total de (4) minutos hasta que los productos se endurezcan por completo/. curas [es decir, (60) segundos para enfriarse, (180) segundos para autoajustarse en la boca].

PASO 4

Lámase los labios y luego coloque la dentadura superior en la boca empujándola hacia el paladar.

Si la dentadura está demasiado caliente, retírela de la boca y deje que se enfríe durante 15-30 segundos más.



PASO 5

Utilice un espejo para alinear los dientes delanteros de la dentadura con la punta de la nariz.



PASO 6

Deslice el pulgar hacia arriba para sujetar la dentadura en el paladar y extiéndala para que se adapte al contorno del paladar.

Utilice los dedos para empujar la dentadura firmemente contra la línea de las encías y manipule la dentadura para que se extienda alrededor de las encías y arco. Mueva los dientes y la dentadura para alinear la mordida y la línea media.

Presione las mejillas para extender la dentadura y ajustarla a los contornos del vestíbulo.



PASO 7

Cierre la boca y chupe con fuerza mientras empuja el pulgar hacia el paladar durante 15 segundos. Intente crear un sello hermético entre la dentadura y el .

Retire Easy Denture antes de que se endurezca completamente. Una vez completado este paso, coloque la dentadura en un recipiente con agua fría durante 30 segundos para que se endurezca.

Para eliminar el exceso de material Nuvoflex™ rosa (pendiente de patente), ablandelo recalentándolo en agua caliente en incrementos de 10 segundos. Una vez ablandado, elimine el exceso recortándolo con tijeras o a mano.




PASO 8

Si es necesario, utilice un bloque pulidor para pulir suavemente los dientes y limar las asperezas o zonas afiladas de la dentadura.

Repita el proceso desde el paso 1 si no consigue el ajuste deseado.

Una vez satisfecho con la colocación de la Dentadura Superior, comience a colocar la Dentadura Inferior.

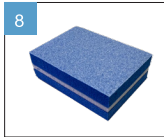

2. Dentadura Inferior

Realice los PASOS 1, 2, 3 y 4 de la sección Dentadura Superior mostrada anteriormente.

Si ya ha colocado la dentadura superior como se indica más arriba, introduzca la dentadura superior ajustada en la boca antes de continuar (si tiene dientes superiores, puede ignorar este paso).



Durante el proceso de autoajuste, no deje la Easy Denture en la boca durante más de 180 segundos, ya que no desea que la dentadura se endurezca completamente mientras esta en la boca.

(180 segundos= 3 minutos)

Por ejemplo, inmediatamente a partir del momento en que saque Easy Denture del agua hirviendo, dispondrá de un total de (4) minutos hasta que los productos se endurezcan por completo/. curas [por ejemplo, (60) segundos para enfriarse, (180) segundos para autoajustarse en la boca].

PASO 5

Lámase los labios y luego coloque la dentadura inferior en la boca empujándola hacia el fondo de la boca.

Si la dentadura está demasiado caliente, retírela de la boca y deje que se enfríe durante 15-30 segundos más.



PASO 6

Primero, alinee la línea media de los dientes inferiores con la línea media de los dientes superiores y presione hacia abajo en la parte delantera. A continuación, alinee los dientes posteriores con los dientes superiores ensanchándolos o estrechándolos hasta que sienta que la mordida es correcta.

Utilice el dedo para moldear la dentadura inferior y adaptarla a la línea inferior de las encías.

Presione las mejillas para extender la dentadura y ajustarla a los contornos del vestíbulo.




PASO 7

Cierre la boca con las dentaduras superior e inferior colocadas y cree una succión tragando varias veces. Mantenga la succión apretada durante 30 segundos.

Retire Easy Denture antes de que se haya endurecido/curado por completo. Una vez completado este paso, coloque la dentadura en el agua fría durante 30 segundos para que se endurezca.

Para eliminar el exceso de material Nuvoflex™ rosa, ablande recalentando en agua caliente usando incrementos de 10 segundos. Una vez ablandado, elimine el exceso recortándolo con tijeras o a mano.

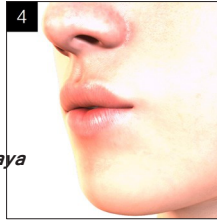

PASO 8

Si es necesario, utilice un bloque pulidor para pulir suavemente los dientes y limar las asperezas o zonas afiladas de la dentadura.

Repita el proceso desde el paso 1 si no consigue el ajuste deseado.

Eso es todo. ¡Sonría!



No olvide que su dentadura postiza requiere un mantenimiento diario. Utilice las pastillas de limpieza aprobadas de Easy Denture para mantenerlas limpias y la crema adhesiva aprobada de Easy Denture para mejorar la colocación y el funcionamiento.

Para más instrucciones y vídeos, visite: [www.easydenture.com](http://www.easydenture.com)

¡SONRÍA MÁS Y RÍA A MENUDO!



Escanee el código QR para ver el video de autoajuste de Easy Denture ahora.